

STABILAB FIRSTICE / DFP

CEINTURE ABDOMINALE
AVEC MANCHON ILIAQUE REPOSITIONNABLE
IMMOBILISATION



Vous pouvez consulter la vidéo de pose de cette attelle en scannant ce QR-code à l'aide de l'appareil photo de votre smartphone.



FONCTION

Prise en charge optimale du complexe ilio-pelvien avec froid FIRSTICE®.

CARACTÉRISTIQUES

L'immobilisation solidarise la partie proximale du fémur à la ceinture abdominale et permet une prise en charge optimale du complexe ilio-pelvien.

2 fermetures par auto-agrippants au niveau de la hanche et de la cuisse permettent un maintien et un positionnement optimal. La ceinture abdominale STABILAB FIRSTICE est livrée avec 2 compresses FIRSTICE® 14x28.

L'ensemble STABILAB FIRSTICE DFP est composé la ceinture abdominale STABILAB FIRSTICE (livrée avec deux compresses FIRSTICE® 14x28) et d'un PACK COMBO DFP.

INDICATIONS

Prise en charge du complexe ilio-pelvien à la suite d'une luxation ou d'une opération de la hanche.

Diminution des inflammations et œdèmes, favorise la résorption des hématomes, soulage la douleur.

Rééducation.

MISE EN PLACE

Placer les compresses FIRSTICE® au moins 2h au congélateur avant la première application. Ne pas mettre l'attelle au congélateur. Malaxer les compresses pour rendre le mélange homogène.

Positionner les compresses FIRSTICE®, à l'intérieur de l'attelle et à l'aide des Velcros®, de manière à ce que la face en tissu soit en contact avec la partie lésée (Fig.1).

Mise en place de l'attelle avec les compresses FIRSTICE® :

Positionner le manchon iliaque avec les compresses sur la hanche en veillant à mettre vers le haut la bande auto-agrippante (Fig.2).

Fixer la ceinture sur la bande auto-agrippante en veillant à positionner les deux bandes auto-agrippantes sur l'abdomen.

Fermer la ceinture en entourant la taille.

Attacher la sangle auto-agrippante autour de la cuisse (Fig.3).

