

+ PLUS PRODUITS



Rabat à accroche auto-agrippante

Rabat thoracique

Sangle de positionnement du coude

☰ CARACTÉRISTIQUES

Dispositif en 1 partie qui s'adapte aux différentes phases du traitement du patient.
Possibilité de libérer l'avant bras tout en garantissant une immobilisation optimale de l'épaule.
Pose facile en 4 étapes.

✍ INDICATIONS MÉDICALES

- > **TRAUMATOLOGIE** : Luxations et fractures (trochiter, tête humérale, glène)
Entorse acromio-claviculaires
Fracture de la clavicule
- > **POST-OPÉRATOIRE** : Chirurgies de la coiffe des rotateurs, de l'articulation acromio-claviculaire ou de la clavicule.
- > **RHUMATOLOGIE** : Périarthrites scapulo-humérale aigüe
- > **NEUROLOGIE** : Paralysies du plexus brachial
Hémiplégies

LPPR : 6186460 - 15,24 € TTC

📺 Vidéo de mise en place disponible

🕒 MISE EN PLACE

1. Positionner la partie courbée de l'attelle sur l'épaule
2. Fermer la partie 2 sur la partie 1
3. Fermer la languette 3 sur la partie 1 au niveau de l'abdomen
4. Après avoir positionné l'avant-bras selon l'angle désiré, fermer le rabat 4.
5. Fermer la languette 5 de soutien du coude
6. Il est possible d'ajuster l'angle d'immobilisation

TAILLE	TOUR DE POITRINE (cm)	CODE ACL
T1 / Junior	55 à 70	3401 O 7014353 1
T2 / S	71 à 80	3401 O 7014376 0
T3 / M	81 à 90	3401 O 7014382 1
T4 / L	91 à 120	3401 O 7014399 9
T5 / XL	121 à 129	3401 O 7014407 1
T6 / XXL	130 à 138	3401 O 4511542 6

