



CULOTTE POUR PROCLIVE POUR ENFANT "STABILITY KID"

Fonctions

Culotte (harnais) pour proclive.

Indications

Instabilité chronique. Entorses bénignes de la tibio-tarsienne.

Précautions

Dispositif médical de classe I.

Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice avant toute utilisation et de consulter votre professionnel de santé en cas d'inconfort ou de douleur.

Suivre les conseils du professionnel qui a prescrit ou délivré ce produit.

Pour des raisons d'hygiène et de performance, l'utilisation de ce produit est strictement personnelle.

Afin de garantir une longue durée de vie et un bon fonctionnement du dispositif, il est déconseillé de l'utiliser en contact direct avec des produits contenant des graisses ou acides (pommades, lotions, etc.).

Veillez à utiliser la bonne taille et la bonne référence.

Dès la mise en place, le bébé doit être obligatoirement sous surveillance constante.

Veiller à ce que les rubans accrocheurs soient bien verrouillés.

Veiller à serrer la fermeture de la culotte modérément. Cette culotte ne convient pas à des lits d'adulte.

Veiller à bien nouer toutes les sangles au lit & barrières de lit. Pour plus de sécurité, mettre les barrières de lit.

Après un lavage, vérifier que le ruban accrocheur soit en parfait état et accroche bien.

Vérifier que la culotte ne soit pas trop grande ou petite de façon à ne pas nuire au bébé (étouffement, chute, extraction de la culotte).


Pose & utilisation uniquement sur prescription médicale.



Conseils de stockage et d'entretien

Nous recommandons de stocker ce dispositif dans son emballage d'origine, à température ambiante, à l'abri de l'humidité et d'une exposition directe à la lumière.

Entretien des éléments textiles, après retrait de la baleine palmaire :

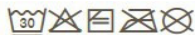

Veiller à ce que les performances ne soient pas altérées avant toute remise en place du dispositif.

Caractéristiques

La culotte pour proclive STABILITY KID se présente en 1 partie. Elle se compose d'un tissu coton (face externe), de bouclette coton (face interne) & de sangles en coton permettant de fixer la culotte au lit. Fermeture par rubans accrocheurs.

Mise en place

La mise en place de ce produit est réalisée sous la responsabilité du praticien.

Ce produit ne doit pas être en contact direct avec une plaie.

Bien veiller à respecter les consignes stipulées dans le protocole délivré par l'hôpital.

1. La partie inférieure de la culotte s'ajuste par fermeture velcro sur les côtés et sur l'avant,
 2. Deux sangles coton cousues au dos permettent la fixation au lit,
 3. Les doubles sangles de la partie supérieure se nouent à la tête de lit de façon à maintenir l'enfant en proclive.
- Après un lavage, vérifier que le ruban accrocheur soit en parfait état et accroche bien.

Composition

Coton, Polyamide.

Tableau des tailles :

Taille	Hauteur (cm)	Tour de taille (cm)	Largeur (cm)	Code ACL	Coloris
M	22	42	26	37600 3544168 7	Blanc étoiles rouges
M/L	27	50	30	37600 3544169 4	Vert étoiles blanches
L	29	56	33	37600 3544170 0	Bleu étoiles blanches

Groupe SOBER SAS - www.sober.fr

Siège Social : 391 rue de l'Avenir - Z.I. des Vernailles Ouest - 69830 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS - France

Tél. : 33 (0)4 74 60 75 03 - Fax : 33 (0)4 74 60 71 06

Contact commercial : commercial@sober.fr - Contact utilisateur : groupesoberetvous@sober.fr

Date de mise à jour de la fiche : août-19 - Année d'apposition du marquage CE : 2016 **CE**