



ATTACHE POIGNETS-CHEVILLES A FIXATIONS "STABILITY FIX"

Fonctions

Maintien des personnes légèrement agitées

Indications et usages

Attaches pour poignets ou chevilles

Précautions

Dispositif médical de classe I.

Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice avant toute utilisation et de consulter votre professionnel de santé en cas d'inconfort ou de douleur.

Suivre les conseils du professionnel qui a prescrit ou délivré ce produit.

Pour des raisons d'hygiène et de performance, l'utilisation de ce produit est strictement personnelle.

Afin de garantir une longue durée de vie et un bon fonctionnement du dispositif, il est déconseillé de l'utiliser en contact direct avec ou des produits contenant des graisses ou acides (pommades, lotions, etc.).

Veillez à utiliser la bonne taille et la bonne référence.

Ne pas blesser le patient en serrant trop fort les sangles de fixation au lit et les attaches poignets.

Vérifier que le réglage des attaches poignets soit bien fait de façon à ce que le patient ne puisse pas s'extraire des attaches.

Ne pas laisser les perfusions ou autres à la portée du patient.

Surveiller le patient toutes les heures.

Pour les petites tailles, ne pas laisser les nouveau-nés sans surveillance.

Pour plus de sécurité, mettre les barrières de lit.

Pose & utilisation uniquement sur prescription médicale.

Ces attaches ne sont pas indiquées pour des patients perturbés et agités, se référer à nos dispositifs de fixation avec clés magnétiques « STABILITY GLOBAL ».



Conseils de stockage et d'entretien

Nous recommandons de stocker ce dispositif dans son emballage d'origine, à température ambiante, à l'abri de l'humidité et d'une exposition directe à la lumière.

Entretien des éléments textiles, après retrait de la baleine palmaire :

Veiller à ce que les performances ne soient pas altérées avant toute remise en place du dispositif.

Caractéristiques

Les attaches poignets ou chevilles se présentent en deux parties, l'attache poignet ou cheville proprement dite en complexe face externe tissu polyamide, face interne bouclette et une sangle de fixation au lit ou au brancard (S à L).

L'attache poignet XS se présente en une seule partie et se compose de tissu antibactérien avec une sangle de fixation cousue dessus.

Fermeture par double système auto-agrippant.

Mise en place

La mise en place de ce produit est réalisée sous la responsabilité du praticien.

Ce produit ne doit pas être en contact direct avec une plaie.

1. Positionner le poignet ou la cheville à l'intérieur de l'attache, bouclette en contact avec le patient.
2. Fermer à l'aide du double système auto-agrippant assurant une fixation optimale.
3. Fixer la sangle au lit ou au brancard par l'intermédiaire de la boucle cousue sur l'attache poignet ou cheville.

Composition

Polyéther sulfone, coton, polyamide, polyester, acier nickelé, PVC

Tableau des tailles :

Modèle	Taille	Longueur attache	Largeur attache	Longueur sangle	Code ACL
Attache-poignets	XXS (bébé)	13cm	3cm	50cm	37600 3544147 2
	XS (petit enfant)	20cm	4.5cm	100cm	37600 3544148 9
	S (enfant/ado)	26 cm	6.5cm		37600 3544149 6
	M/L (adulte)	29cm	7cm		37600 35441502
Attache-chevilles	S (enfant/ado)	29cm	7cm		37600 3544181 6
	M/L	35cm	8.5cm		37600 3544182 3



Groupe SOBER SAS - www.sober.fr

Siège Social : 391 rue de l'Avenir - Z.I. des Vernailles Ouest - 69830 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS - France

Tél. : 33 (0)4 74 60 75 03 - Fax : 33 (0)4 74 60 71 06

Contact commercial : commercial@sober.fr - Contact utilisateur : groupesoberetvous@sober.fr

Date de mise à jour de la fiche : août-17 - Année d'apposition du marquage CE : 2016