



# ORTHÈSE POIGNET-MAIN "STABIPOIGNET CARE"

## Fonctions

Immobilisation de poignet grâce à des armatures palmaire et latérale

## Indications et usages

Immobilisation suite à des lésions articulaires et ligamentaires  
Tendinites, Rhumatisme / Utilisation pré ou post opératoire

## Précautions

Dispositif médical de classe I.

Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice avant toute utilisation et de consulter votre professionnel de santé en cas d'inconfort ou de douleur. Suivre les conseils du professionnel qui a prescrit ou délivré ce produit. Pour des raisons d'hygiène et de performance, l'utilisation de ce produit est strictement personnelle. Afin de garantir une longue durée de vie et un bon fonctionnement du dispositif, il est déconseillé de l'utiliser en contact direct avec des produits contenant des graisses ou acides (pommades, lotions, etc.).

Veillez à utiliser la bonne taille et la bonne référence.



## Conseils de stockage et d'entretien

Nous recommandons de stocker ce dispositif dans son emballage d'origine, à température ambiante, à l'abri de l'humidité et d'une exposition directe à la lumière.

Entretien des éléments textiles, après retrait de la baleine :

Veiller à ce que les performances ne soient pas altérées avant toute remise en place du dispositif.

## Caractéristiques

Le STABIPOIGNET CARE se compose :

- de l'orthèse proprement dite en complexe ép. 10mm face externe maille grattée / face interne éponge
- trois capitons de protection prévus avec l'orthèse et peuvent être placés sur la partie dorsale sous les auto-agrippants pour apporter plus de confort
- d'une bande auto-agrippant crochet
- d'une baleine palmaire et d'une baleine latérale

Fermeture par système auto-agrippant

## Mise en place

La mise en place de ce produit est réalisée sous la responsabilité du praticien.

Ce produit ne doit pas être en contact direct avec une plaie.

1. Ouvrir l'orthèse, positionner le pouce dans l'échancrure de celle-ci, puis refermer les bandes auto-agrippantes
2. Verrouiller l'orthèse en plaçant la bande auto-agrippante complémentaire autour de l'articulation du poignet.

Cette bande permet également le cas échéant un accès aisé aux broches

## Composition

Polyamide, Polyester, Coton, Polyuréthane, Polypropylène/ PVC, Aluminium.

## Tableau des tailles :

Taille	Tour de poignet	Longueur	Code ACL Main gauche	Code ACL Main droite	Coloris
S	14 - 16 cm	26 cm	34010 <b>7377771</b> 9	34010 <b>7377736</b> 8	Noir
M	16 - 18 cm	28cm	34010 <b>7377788</b> 7	34010 <b>7377742</b> 9	
L	18 - 21 cm	28cm	34010 <b>7377794</b> 8	34010 <b>7377759</b> 7	
XL	21 - 23cm	31cm	34010 <b>7377802</b> 0	34010 <b>7377765</b> 8	

